



Gib der Verwechslung
Keine Chance

▲ Medikationsfehler und „Beinahe-Fehlgaben“

Medikationsfehler stellen im Gesundheitswesen weltweit eines der wichtigsten Probleme für die Patientensicherheit dar. Forschungsergebnisse zeigen, dass verwechselte Spritzen zu den häufigsten Faktoren zählen, die zu Medikationsfehlern beitragen. Derartige Fehler können für den Patienten ernsthafte, wenn nicht tödliche Folgen haben - mit schweren psychologischen Langzeitschäden für das behandelnde Behandlungspersonal. Die Kliniken haben nicht nur mit den finanziellen Folgen sondern vor allem mit dauerhaften Imageschäden zu kämpfen.

Eigene Erfahrung mit solchen Fehlern und Beinahe-Fehlgaben brachten drei australische Sanitäter auf eine neue Lösung - sie erfanden den Qlicksmart CheckCLIP.

▲ Verwenden Sie CheckCLIP zur Vermeidung von Medikationsfehlern



Mit diesem unter Umständen lebensrettenden System werden die Spritze und die Ampulle beim Aufziehen des Medikaments nicht aus der Hand gelegt. Die Gefahr, die Spritze oder Ampulle zu verwechseln, reduziert sich dadurch erheblich.



CheckCLIP überzeugt durch einfache und schnelle Anwendung und ermöglicht die zuverlässige Kontrolle der Medikationsangaben auf einen Blick - ohne dabei die Dosiermarkierungen auf der Spritze zu verdecken.



Dies verbessert die Nachverfolgung und Identifizierung der verabreichten Medikamente und unterstützt die Umsetzung der „Fünf Punkte für Medikamentensicherheit“.



Eine kostensparende und hocheffiziente Sicherheitslösung, die bei Beschäftigten im Gesundheitswesen weltweit bereits sehr positiven Anklang findet.

Das Pflegepersonal trägt die Verantwortung für sorgfältige und fehlerfreie Medikamentengabe. Die Bereitstellung angemessener Mittel für diese Aufgabe obliegt der Krankenhausverwaltung. Greifen Sie zu Qlicksmart CheckCLIP und verringern Sie dadurch Medikationsfehler.

Spezifikationen

Ausführung	Für Brechampulle	Für Stechampullen
Artikelnummer	QSCCGEN	QSCCVIAL
Kompatible Spritzengrößen	1-20ml Luer und Luer-Lock (grösstenteils)*	
Kompatible Ampullengrößen	Glas- und Plastikampullen 1-10ml (grösstenteils)**	Stechampullen mit Durchmesser bis 28mm*** (Summe aus Spritzenradius und Stechampullenradius muss kleiner als 23mm sein)
Masse (Einheit)	Länge 3.7cm Breite 2cm Höhe 2.5cm	Länge 4.2cm Breite 2cm Höhe 1.8cm
Gewicht (Einheit)	Ca. 1g	Ca. 1g
GMDN code	46240	

* Kompatibilität bedingt durch Form und Durchmesser der Spritze

** Nicht geeignet für Ampullen mit Inhalt ≥ 25 ml

*** Kompatibilität bedingt durch Form und Durchmesser der Stechampulle


Material	Polypropylen (PP)
Latex	Nein
DEHP	Nein
Sterile	Nein
Wiederverwendbar	Nein, verbindet 1 Ampulle mit einer Spritze
Entsorgung	Nachdem das Medikament verabreicht wurde und keine weitere Identifizierung mehr erforderlich ist wird die gesamte Einheit (Spritze einschliesslich CheckCLIP mit angeclipster Ampulle) als medizinischer Abfall in einem Behälter für spitze und scharfe Gegenstände entsorgt.
Zulassungen	Australien - Genehmigung TGA ARTG NO: 134522 USA - FDA -Zulassung

Hinweise zur Anwendung von CheckCLIP

CheckCLIP


Einweg | Medikationsidentifikation

CheckCLIP FÜR BRECHAMPULLE

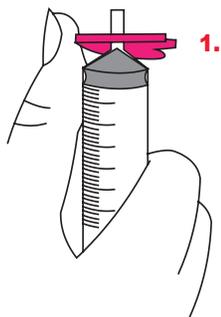


1.

CheckCLIP mit dem Widerhaken nach unten halten und mit dem Daumen auf die Spritze schieben.

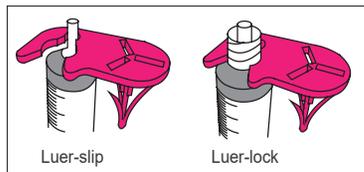


Luer-slip

Luer-lock

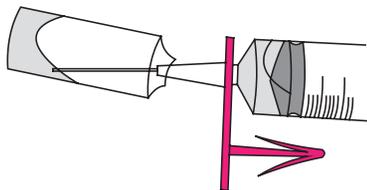


2. Ampulle aufbrechen und das Medikament aufziehen – dabei Ampulle und Spritze in der Hand behalten.

3. Ampulle auf CheckCLIP drücken.

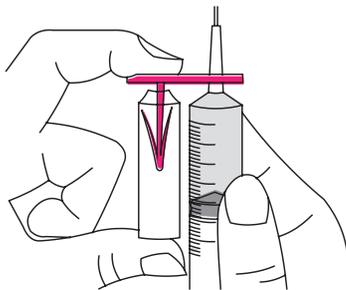


4. Vor der Verabreichung Medikament und Dosierung kontrollieren.

CheckCLIP FÜR STECHAMPULLEN

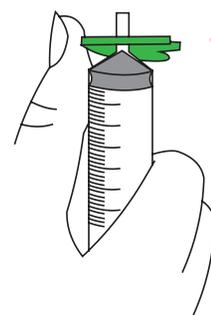


1.

CheckCLIP mit dem Widerhaken nach unten halten und mit dem Daumen auf die Spritze schieben.

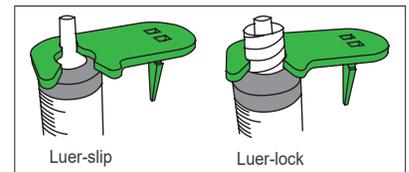


Luer-slip

Luer-lock

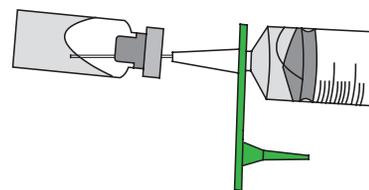

2. Stechampulle aufbrechen und das Medikament aufziehen – dabei Ampulle und Spritze in der Hand behalten.

3. Stechampulle auf den CheckCLIP drücken.

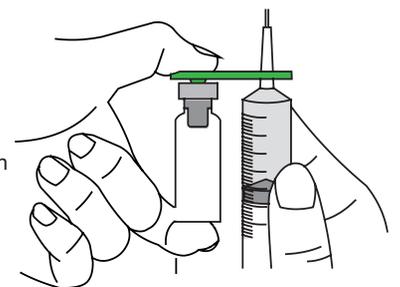

4. Vor der Verabreichung Medikament und Dosierung kontrollieren.

Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australien



+61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



www.qlicksmart.com



hello@qlicksmart.com

Vertrieb:

Bleiben Sie in Kontakt

