

CheckCLIP

Single-Use | Medication ID

Lavorare
sicuro oggi,
Agire sicuro
domani



www.qlicksmart.com

 **QLICKSMART**[®]
... and be safe


Errori nella somministrazione dei farmaci

Gli errori nella somministrazione di farmaci sono considerati come uno dei principali problemi per la sicurezza dei pazienti nel settore sanitario a livello globale. La ricerca mostra che lo scambio di siringhe è uno dei fattori che contribuiscono maggiormente all'errore nella somministrazione di farmaci. Tali errori possono danneggiare o addirittura provocare la morte dei pazienti con successivi gravi danni psicologici di lunga durata ai medici curanti. Gli ospedali subiscono danni finanziari e di immagine. L'esposizione diretta a questi rischi di errore ha ispirato tre infermieri australiani ad ideare il **Qlicksmart CheckCLIP**.

Sistema innovativo per l'etichettatura dei farmaci



Questo dispositivo potenzialmente salvavita consente al medico di aspirare il farmaco da una fiala o da un flaconcino che rimangono sempre a fianco della siringa. Ciò riduce il rischio di errori nella somministrazione dei farmaci.

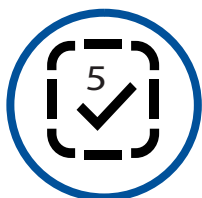

Ciò migliora il monitoraggio e l'identificazione dei farmaci e contribuisce al rispetto delle cinque regole di somministrazione dei farmaci.




CheckCLIP è semplice e veloce da usare, consentendo una chiara visione delle tacche di dosaggio poste sulla siringa.



Un'amministrazione accurata dei farmaci è responsabilità di tutti gli operatori della sanità. Fornire i mezzi per farlo è responsabilità della direzione ospedaliera.

Usa CheckCLIP di Qlicksmart per aiutarti ad affrontare il problema di errore nella somministrazione dei farmaci.

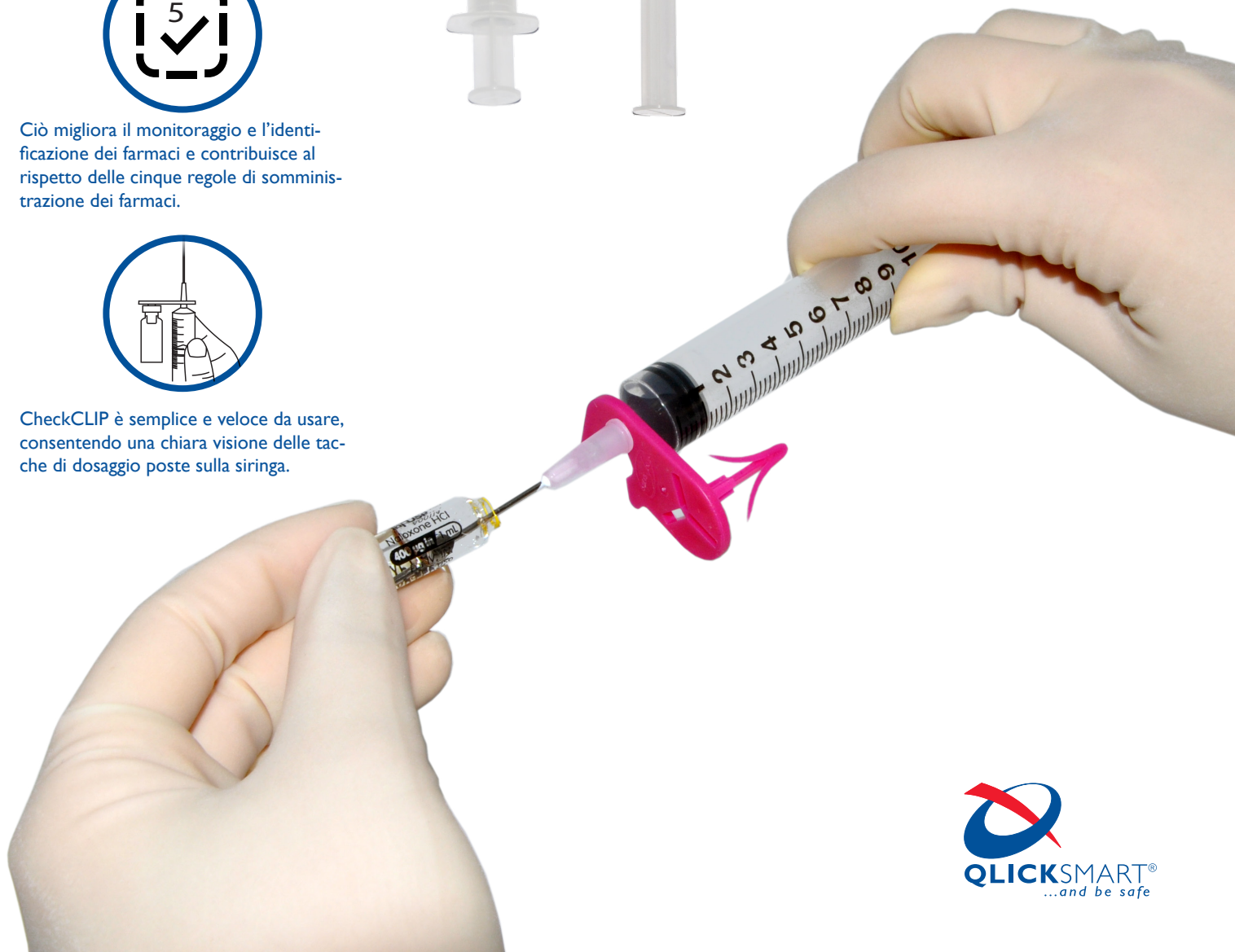

Specifiche Tecniche

Prodotto	Per flaconcino	Per Fiala	Materiale	Polipropilene (PP)
Codice prodotto	QSCCGEN	QSCCVIAL	Latex	No
Dimensioni della siringa compatibilità	Cono Luer e Luer lock da 1 – 20 ml *		Dehp	No
Dimensioni compatibili di fiale / flaconcino	Fiale di vetro e plastica 1-10 ml **	Flaconcini con diametro fino a 28 mm*** (La somma del raggio della siringa e del raggio del flaconcino deve essere inferiore a 23 mm)	Sterile	No
Dimensioni (per unità)	Lunghezza 3,7 cm Larghezza 2cm Altezza 2,5 cm	Lunghezza 4,2 cm Larghezza 2cm Altezza 1.8cm	Riutilizzabile	No: Ogni unità attacca 1 fiala o flaconcino su una Siringa.
Peso (per unità)	Circa 1g	Circa 1g	Metodo di smaltimento	Una volta che i farmaci sono stati somministrati CheckClip con la fiala o il flaconcino attaccati va smaltito nei rifiuti speciali
Codice GMDN	46240		Normative	Australia - Scheda sotto TGA ARTG NO:134522 Usa – FDA elencato


* La compatibilità dipende dalla geometria e dal diametro della siringa

** Le eccezioni includono fiale da 25 ml o più



*** La compatibilità dipende dalla geometria e dal diametro del flaconcino

Come utilizzare CheckCLIP

CheckCLIP PER FIALA


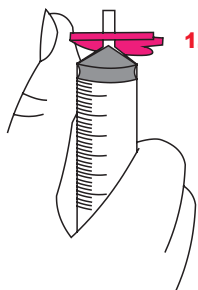


1. Posizionare la spina verso il basso e spingere CheckCLIP sulla siringa usando il pollice.

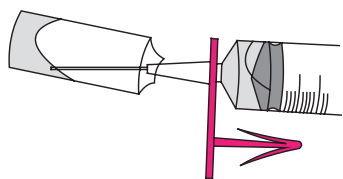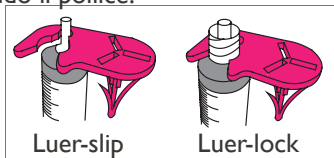


2. Aprire la fiala e aspirare il farmaco con la siringa nelle mani.

3. Spingere verso l'alto la fiala vuota su CheckCLIP

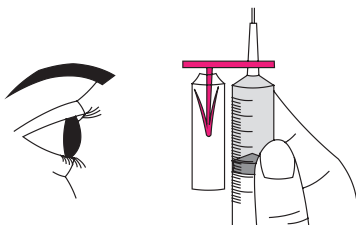
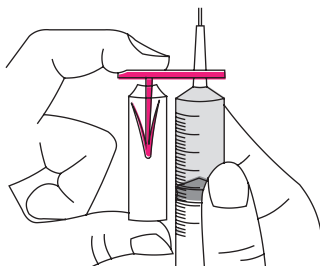


4. Ricontrollare il dosaggio prima di iniettare.

CheckCLIP PER FLACONCINO


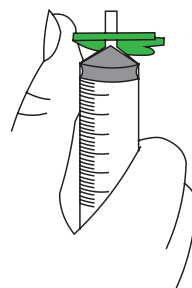


1. Posizionare la spina verso il basso e spingere CheckCLIP sulla siringa usando il pollice.

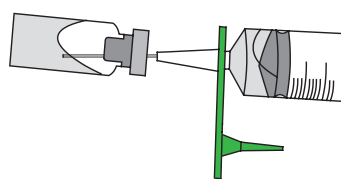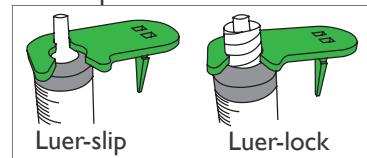

2. Aprire il flaconcino e aspirare il farmaco con la siringa nelle mani.

3. Spingere il flaconcino vuoto verso l'alto su CheckCLIP.

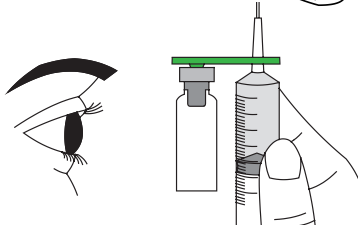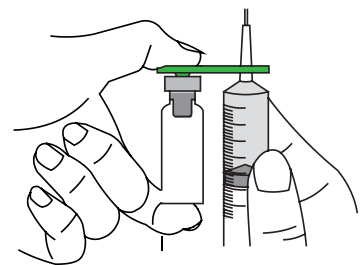


4. Ricontrollare il dosaggio prima di iniettare.

Altri prodotti Qlicksmart

BladeFLASK Scalpel
Blade Remover




BladeCASSETTE Sterile
Scalpel Blade Remover

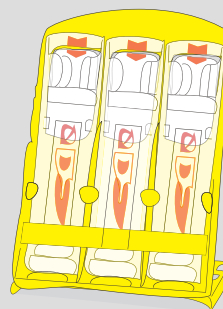

SnapIT and SnapIT Lite Ampoule Openers



BladeNeedleSYSTEM Sterile 2-in-1
Needle Counter + Blade Remover

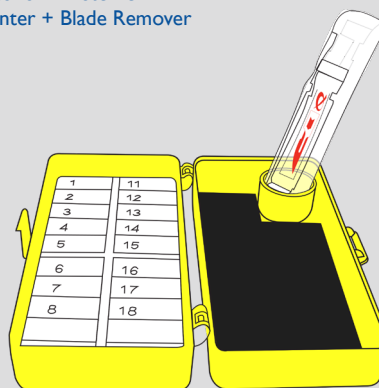

Informazioni su Qlicksmart

Qlicksmart Pty Ltd si impegna a rendere la vita degli operatori sanitari più facile e sicura, in modo che possano concentrarsi sull'assistenza ai pazienti. Fondata nel 1999 da due medici australiani per evitare i tagli accidentali da bisturi negli ospedali, i nostri pluripremiati dispositivi di sicurezza vengono attualmente utilizzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Qlicksmart collabora con specialisti del settore sanitario per fornire soluzioni che risolvano i problemi connessi al rischio di infortuni di infermieri, chirurghi e strutture sanitarie. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di sicurezza Qlicksmart, visita www.qlicksmart.com o chiedi al tuo distributore una dimostrazione oggi stesso.

Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street
West End, Brisbane
QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com
www.qlicksmart.com



cerca "qlicksmart"
e rimanere connessi



Distribuito da: