

BladeCASSETTE

3in1 | Rimozione lama

**Lavorare
sicuro oggi,
Agire sicuro
domani**



www.qlicksmart.com

 **QLICKSMART[®]**
... and be safe


L'infortunio da tagliente

Le lesioni da bisturi hanno la probabilità di verificarsi 200 volte in più rispetto a quelle da ago. Sono particolarmente comuni negli ambienti chirurgici. Purtroppo, molti utenti e amministratori sottovalutano la probabilità di queste lesioni.

I tagli accidentali da bisturi possono accadere a chiunque, incluso te. Non importa quanta esperienza tu abbia nella gestione del bisturi. Questi incidenti possono creare gravi infezioni causate dal contatto con sangue infetto. Alcune lesioni gravi possono richiedere un intervento di microchirurgia per riparare arterie, nervi e tendini.

Molte di queste lesioni da bisturi possono essere facilmente prevenute utilizzando Qlicksmart BladeCASSETTE, l'innovativo sistema per eliminare la lama del bisturi con una sola mano.

L'innovativo dispositivo di rimozione della lama con una mano sola

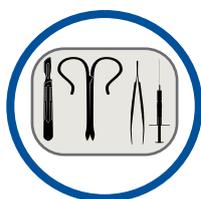

Con una forma stabile e compatta, BladeCASSETTE è stato appositamente progettato per l'utilizzo in campo sterile.



BladeCASSETTE è semplice da usare con una rapida azione "push, click and pull" per rimuovere e contenere le lame del bisturi usate.



Questa soluzione facile da usare offre un'alternativa al bisturi di sicurezza, a costi inferiori e consente a tutti i chirurghi di mantenere le proprie preferenze per i manici metallici standard.



Utilizzato insieme a una tecnica di passaggio a mani libere, BladeCASSETTE può prevenire fino a 5 volte le lesioni rispetto ad un bisturi di sicurezza.



BladeCASSETTE può contenere fino a 3 lame chirurgiche usate e consente un conteggio accurato e uno smaltimento efficiente.



È già stato adottato dagli operatori sanitari di tutto il mondo per la sua doppia funzione, risparmio sui costi e facilità di inclusione nei pacchi procedurali personalizzati.



Specifiche tecniche

Colore	Rosso - per USA Giallo - per gli altri paesi
Codice prodotto	QSSVCAS-3
Codice GMDN	46236
Capacità lame	3 lame – Ogni set di BladeCASSETTE contiene 3 cartucce di rimozione della lama. Una cartuccia contiene 1 lama.
Compatibilità Lame e manici*	Manici: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Baron, manico Lawton long, manico cilindrico Lame: #10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sabre D/15.
Incompatibilità lame e manici	Manico a coda di castoro, bisturi monouso
Dimensioni (per unità)	Chiuso: Lunghezza: 11cm Larghezza: 5.7cm Spessore: 0.9cm Aperto***: Lunghezza: 7.3cm Larghezza: 5.7cm Altezza: 10cm
Peso (per unità)	<50gr

Materiale	Polipropilene (PP)
Latex	No
DEHP	No
Sterile	Sì
Metodo di sterilizzazione	Raggi gamma o ETO
Riutilizzabile	No. Ogni unità rimuove fino a 3 lame prima dello smaltimento
Metodo di smaltimento	Dopo aver eseguito il conteggio delle lame, l'intero set BladeCassette viene smaltito come rifiuto speciale.
Approvazioni normative	Normative Australia - Scheda TGA ARTG NO: 134623 USA – approvato da FDA Europa – dispositivo medico sterile di Classe I secondo le Directive 93/42/EEC e marchio CE


BCBI60510A4-ITA

* La maggior parte dei Marchi può essere utilizzata con Qlicksmart BladeCASSETTE


Istruzioni d'uso

PREPARE

USANDO DUE MANI:

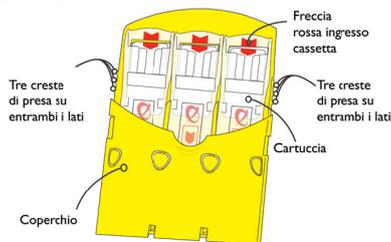


1. Premere le creste di presa sul lato per rilasciare il coperchio.

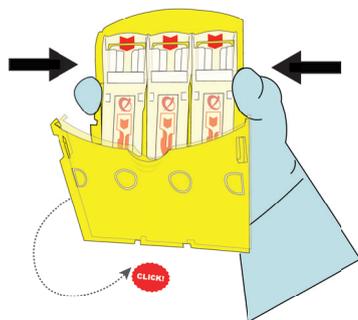


2. Ripiegare il coperchio fino a sentire un clic per bloccarlo e posizionare BladeCASSETTE su un telo.

ATTIVARE

CON UNA MANO:

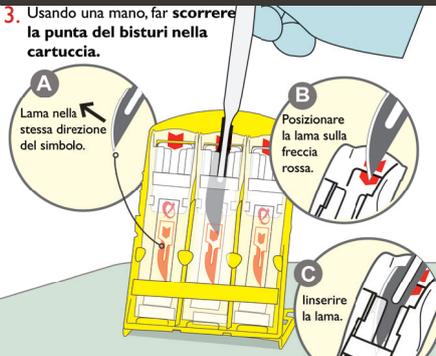


4. Inclina BladeCASSETTE a 90°, quindi spingi verso il basso il bisturi fino a sentire un clic.

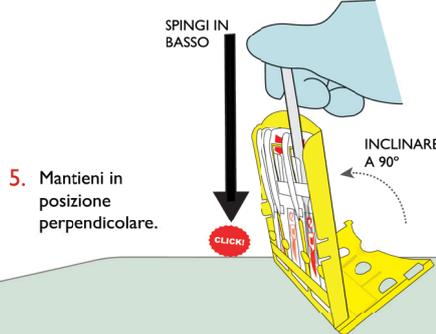

5. Mantieni in posizione perpendicolare.

SICURO


USANDO DUE MANI:

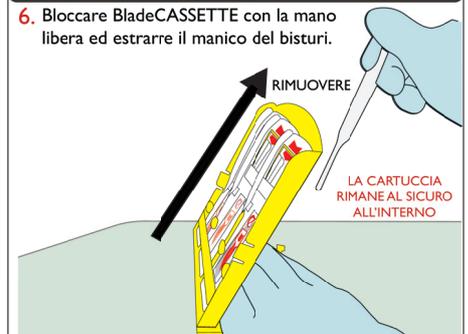

7. Se necessario, ripetere la stessa procedura per riempire le cartucce rimanenti.


8. Chiudere il coperchio.

9. Le lame del bisturi possono ora essere facilmente contaminate e BladeCASSETTE è pronto per lo smaltimento.

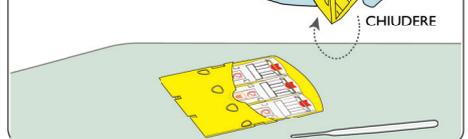


Altri prodotti Qlicksmart

BladeFlask EVO
Scalpel Blade Remover

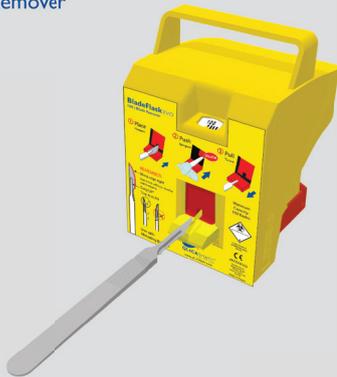

BladeNeedleSYSTEM Sterile 2-in-1
Needle Counter + Blade Remover

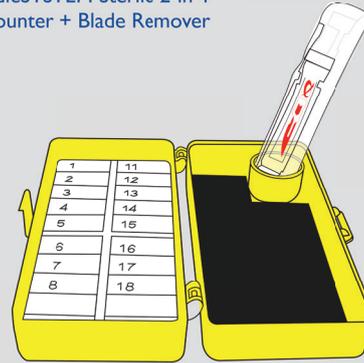

SnapIT and SnapIT Lite Ampoule Openers



BladeSINGLE Scalpel Blade Remover



CheckCLIP Medication Identification



Informazioni su Qlicksmart

Qlicksmart Pty Ltd si impegna a rendere la vita degli operatori sanitari più facile e sicura, in modo che possano concentrarsi sull'assistenza ai pazienti. Fondata nel 1999 da due medici australiani per evitare i tagli accidentali da bisturi negli ospedali, i nostri pluripremiati dispositivi di sicurezza vengono attualmente utilizzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Qlicksmart collabora con specialisti del settore sanitario per fornire soluzioni che risolvano i problemi connessi al rischio di infortuni di infermieri, chirurghi e strutture sanitarie. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di sicurezza Qlicksmart, visita www.qlicksmart.com o chiedi al tuo distributore una dimostrazione oggi stesso.

Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street
West End, Brisbane
QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com
www.qlicksmart.com



cerca "qlicksmart"
e rimanere connessi



Distribuito da: