

Protège-toi

Enlèvement sûre de lame

▲ Les blessures oubliées dues aux objets tranchants

Les blessures par scalpel sont 200 fois plus susceptibles de se produire que celles dues aux aiguilles. Elles sont particulièrement fréquentes dans les cadres chirurgicaux. Malheureusement, de nombreux utilisateurs et administrateurs cliniques ont sous-estimé la probabilité de telles blessures.

Les coupures dues aux scalpels peuvent arriver à tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre expérience dans le maniement des scalpels. Ces coupures peuvent entraîner des infections, des maladies transmises par le sang et une détresse psychologique. D'autres blessure graves peuvent imposer une microchirurgie afin de réparer es artères, les nerfs et les tendons digitaux.

De nombreuses blessures par scalpel peuvent aisément être évitées grâce au BladeFLASK Qlicksmart, le premier extracteur de lames une main au monde.









▲ L'extracteur de lames primé



Les BladeFLASK Qlicksmart ont extrait en toute sécurité plus de 70 millions de lames de scalpels contaminées et évité jusqu'à 165 000 blessures au niveau mondial.



Le BladeFLASK est facile à utiliser avec une action rapide « pousser, cliquer et tirer » pour extraire et protéger les lames de scalpel usagées.



Cette solution facile à utiliser constitue une alternative plus économique aux scalpels de sécurité.



Utilisé avec la remise d'instruments sans mains, le BladeFLASK peut éviter jusqu'à 5 fois plus de blessures qu'un scalpel de sécurité.



Le BladeFLASK permet aux utilisateurs de lames de scalpels de conserver leurs préférences pour les manches métalliques standards.



Le BladeFLASK a reçu de nombreuses récompenses, ce qui prouve son aspect pratique et son efficacité dans la réduction des blessures dues aux scalpels.

La sécurité sur le lieu de travail constitue le droit de tous les professionnels de santé et la responsabilité de tous les employeurs.

Utilisez le BladeFLASK Qlicksmart et protégez-vous.






▲ Spécifications

Version couleus	Rouge - USA Jaune – pour tous les autres pays		
Référence produit	QFRGEN – version rouge QFYGEN – version jaune		
Code GMDN	46235		
Capacité	100 blades – se bloque automatiquement lorsque la capacité maximale est atteinte		
Lames & manches compatibles*	Manches: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Lawton manche long Lames: #10, 10a, 11, 12, 13, etc. jusqu'à #25a, 27 et 36 inclus.		
Lames & manches incompatibles	Manches Baron, manches Beaver, manches à usage unique		
Dimension (unité)	Longueur 11cm , Largeur 9cm , Hauteur 14cm		
Poids (unité)	Approximativement 250g		
Accessories	Support de montage – maintient le BladeFLASK en place permettant l'extraction des lames à une main		


* Certains éléments	peuvent ne pas	s être compatibles avec	le BladeFLASK Qlicksmart
---------------------	----------------	-------------------------	--------------------------

Matériau	Corps: Acrylonitrile-butadiène- styrène (ABS) Mécanisme interne: Polyacetal (POM)		
Latex	Non		
DEHP	Non		
Sterile	Non		
Réutilisable	Multi-usage – extrait 100 lames avant elimination		
Mode d'élimination	Comme déchet medical – veuillez respecter les procedures de votre établissement en matière d'élimination des déchets médicaux.		
Informations réglementaires	Australie – Répertorié dans TGA ARTG NO: 146821 Etats-Unis- Agrément de pré-commercialisation FDA 510(K) #K983367 comme conteneur pour objets tranchants Europe – Dispositif medical de Classe I conformément à la Directive du Conseil 93/42/EEC avec marquage CE		

■ Utilisation du BladeFLASK

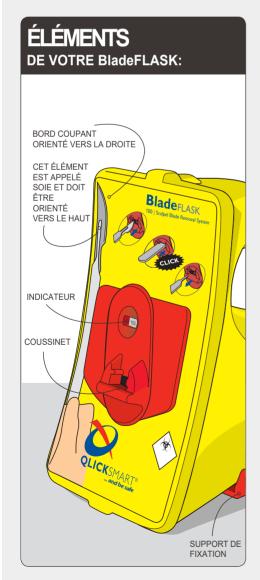



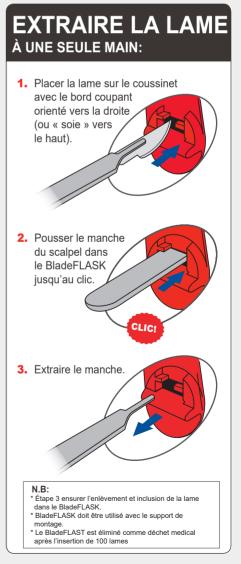



Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street, West End, Brisbane, QLD 4101, Australie



& +61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



www.qlicksmart.com



hello@qlicksmart.com

Restez en contact











Distribué par:

Γ