

 **QLICKSMART®**
BladeNeedleSYSTEM

Sistema per la rimozione delle lame e per la conta degli aghi



Lavorare sicuro oggi,

Agire sicuro domani

▲ L'infortunio da tagliente

Le lesioni da bisturi hanno la probabilità di verificarsi 200 volte in più rispetto a quelle da ago. Sono particolarmente comuni negli ambienti chirurgici. Purtroppo, molti utenti e amministratori sottovalutano la probabilità di queste lesioni.

I tagli accidentali da bisturi possono accadere a chiunque, incluso te. Non importa quanta esperienza tu abbia nella gestione del bisturi. Questi incidenti possono creare gravi infezioni causate dal contatto con sangue infetto. Alcune lesioni gravi possono richiedere un intervento di microchirurgia per riparare arterie, nervi e tendini.

Molte di queste lesioni possono essere facilmente prevenute utilizzando BladeNeedleSYSTEM, l'innovativo sistema per eliminare la lama del bisturi con una sola mano.



▲ Sistema innovativo



BNS è costituito da due dispositivi di sicurezza in uno: il dispositivo per la rimozione con una sola mano della lama del bisturi è combinato con un conta aghi standard per consentire un conteggio accurato e uno smaltimento sicuro sia delle lame del bisturi che degli aghi di sutura.




BNS è semplice da usare con una rapida azione "push, click, and pull" per rimuovere e contenere le lame del bisturi usate.



Questa soluzione facile da usare offre un'alternativa a basso costo al bisturi di sicurezza, consentendo ai chirurghi di mantenere le loro preferenze per il manipolo metallico standard.



Utilizzato insieme a una tecnica di passaggio a mani libere, Qlicksmart BNS può prevenire fino a 5 volte le lesioni rispetto ad un bisturi di sicurezza.

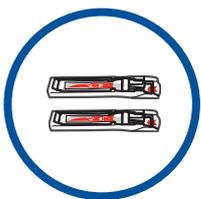

Per le principali procedure chirurgiche sono disponibili ulteriori cartucce monouso di rimozione della lama.



È già stato adottato dagli operatori sanitari di tutto il mondo per la sua doppia funzione, risparmio sui costi e facilità di inclusione nei pacchi procedurali personalizzati.



Il Bns è costituito da un blocco di schiuma numerato per gli aghi, una superficie magnetica per contenere taglienti e due cartucce Qlicksmart per rimuovere con una mano sola la lama dal bisturi usato.

La sicurezza sul posto di lavoro è un diritto di tutti gli operatori sanitari e la responsabilità di tutti i datori di lavoro. Utilizzare Qlicksmart BladeNeedleSYSTEM ed essere al sicuro

▲ Specifiche tecniche

Codice prodotto	QBNS202S	
Codice GMDN	46236	
Capacità	2 cartucce per unità:: ogni cartuccia rimuove 1 (una) Lama.	
Compatibilità Lame e manici*	Impugnatura:: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, barone, cilindrico. Lame: #10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sciabola D/15.	
Incompatibilità lame e manici	Manico a coda di castoro, bisturi monouso	
Dimensioni (per unità)	Chiuso: Lunghezza 11,7 cm Larghezza 6.6cm Altezza 3,9 cm	Aperto**: Lunghezza 11,7 cm Larghezza 12,7 cm Altezza 8,7 cm
Peso (per unità)	51g	

Materiale	Conta aghi: polistirene ad alto impatto Cartucce: polipropilene (PP)
Latex	No
DEHP	No
Sterile	Sì
Metodo di sterilizzazione	Radiazioni Gamma
Riutilizzabile	No ogni cartuccia monouso rimuove 1 (una) lama
Metodo di smaltimento	Dopo aver eseguito il conteggio delle lame e degli aghi, il conta aghi e le cartucce vengono smaltiti separatamente come rifiuti speciali.
Approvazioni Normative	Australia - Scheda sotto TGA ARTG NO: 208058 USA - FDA elenca Europa - Dispositivo medico sterile di classe I ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio e CE

*La maggior parte dei marchi è compatibile con Qlicksmart BladeNeedleSystem


** La scatola aperta con cartuccia in piedi nel supporto

▲ Istruzioni d'uso


BladeNeedleSYSTEM Blade Remover | Needle Counter

PREPARARE USANDO DUE MANI:

1. Staccare i copri adesivo, aprire il BNS e fissare le parti sul pianostile the BNS down.

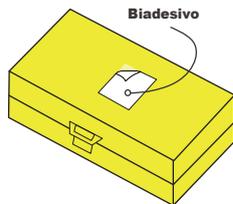


2. Per rimuovere la lama del bisturi prendere una cartuccia e posizionarla all'interno del supporto cilindrico.

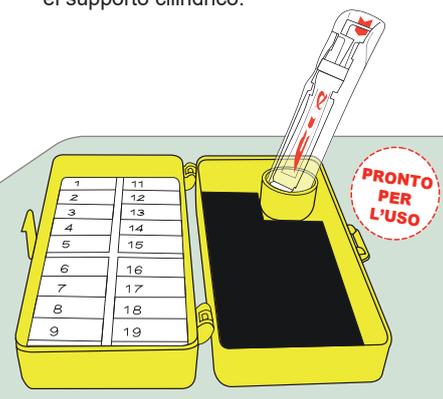


ATTIVARE USANDO UNA MANO


3. Utilizzando una sola mano, far scorrere la punta del bisturi nella cartuccia

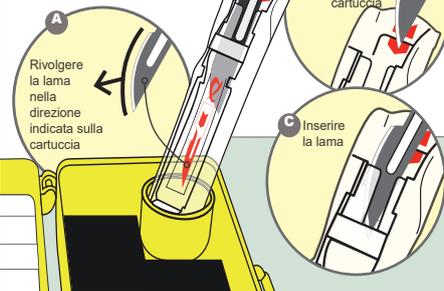

4. Portare la cassetta perpendicolare al piano d'appoggio, spingere fino in fondo il bisturi fino a sentire "Click"

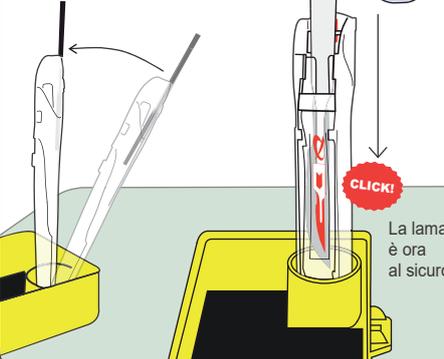


5. Rimuovere la cartuccia dal supporto cilindrico

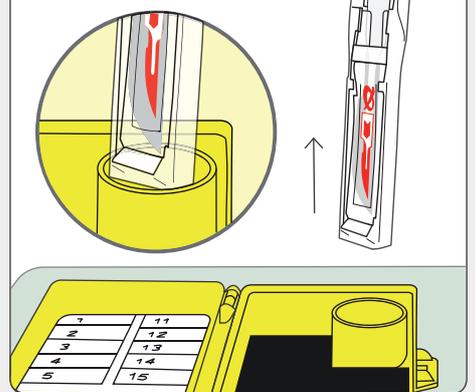


SICURO USANDO DUE MANI:

6. Estrarre il manico del bisturi

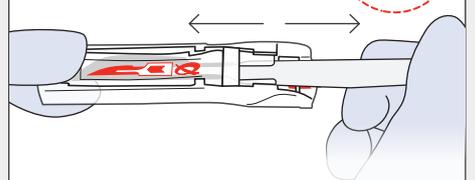

7. La lama rimane imprigionata nella cassetta, pronta per lo smaltimento

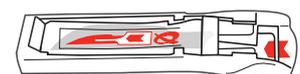

Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australia



+61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



www.qlicksmart.com



hello@qlicksmart.com

Distribuito da:

Rimani connesso

