


Instrucciones de uso

INDICADOR:
MUESTRA DE QUÉ MANERA
DEBE HACER FRENTE EL
BORDE AFILADO.


ESTA PARTE DEL
MANGO DEL BISTURI SE
LLAMA EL TANG.

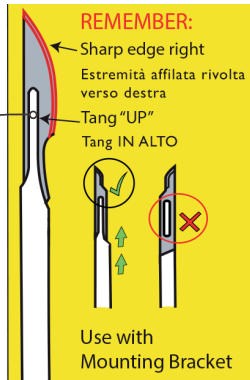

MONTAJE A LA PARED O CARRO:

1. Si no ha montado su BladeFlask EVO antes, prepare el soporte universal*.

A EL SOPORTO TIENE CINTA DE DOBLE CARA EN LA PARTE INFERIOR

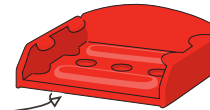

B O USE TORNILLOS



* Consulte la plantilla de montaje y las instrucciones dentro del empaque del soporte.

2. BladeFlask EVO se puede montar en una pared, en un carro o banco.

DESGLIZAR
HACIA
ABAJO
EN EL
SOPORTE




DESGLICE
HACIA
ATRÁS EN EL
SOPORTE


NOTA: BladeFlask EVO debe montarse en el soporte durante el uso.

REMOVER LA HOJA ACCION CON UNA SOLA MANO:


1. Ponga la hoja en la zona de aterrizaje con el borde afilado apuntando hacia la derecha (o "TANG" hacia arriba).

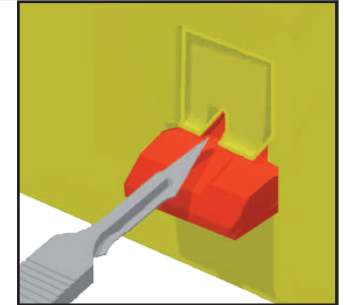

2. Empuje el bisturí gentilmente, hacía adentro del BladeFlask EVO a lo largo de la rampa, hasta que escuche un clic.

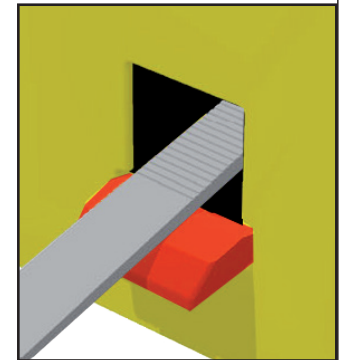

3. Retire el mango.

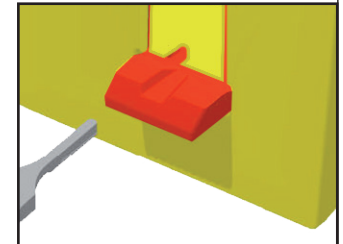

NOTA: BladeFlask EVO se dispone como desecho médico después que el contador se cierra automáticamente el dispositivo cuando este alcanza su capacidad máxima.

