

Instrucciones de uso

PARTES

DE SU BladeFLASK:

INDICADOR:
MUESTRA LA DIRECCIÓN HACIA
LA QUE DEBE MIRAR EL BORDE
AFILADO.

ESTA PARTE
DEL BISTURÍ SE
LLAMA ESPIGA.

CONTADOR

SUPERFICIE DE
APOYO

SOPORTE DE
MONTAJE

MONTAR

EN UNA PARED O UN CARRITO:

1. Si no ha montado previamente su BladeFLASK, prepare el soporte de montaje*.

A EL SOPORTE TIENE CINTA
ADHESIVA DE DOBLE CARA EN
LA PARTE INFERIOR

B O UTILICE TORNILLOS.

* Consulte la plantilla y las instrucciones de
instalación que vienen dentro del envoltorio
del soporte.

2. El BladeFLASK
se puede montar
en una pared o
en un carrito o
mesa de trabajo.

DESGLIZAR
HACIA
ABAJO
EN EL
SOPORTE

DESGLIZAR
HACIA
ATRÁS EN EL
SOPORTE

NOTA: El BladeFLASK
permanece en el
soporte de montaje
durante su uso.

REMOVER LA HOJA DE BISTURÍ CON UNA SOLA MANO:

1. Coloque la hoja de bisturí
en la superficie de apoyo
con el borde afilado
mirando hacia la derecha
(o con la "espiga" hacia
arriba).

2. Introduzca el
bisturí en el
BladeFLASK
y empuje
hasta que
escuche un
clic.

3. Remueva el
bisturí.

NOTA: El BladeFLASK se dispone
como residuo médico después de
haber insertado 100 hojas de bisturí.