


BladeCASSETTE

Extractor de hojas de bisturí | 3 en 1


Instrucciones de uso

PREPARAR

EL BladeCASSETTE:

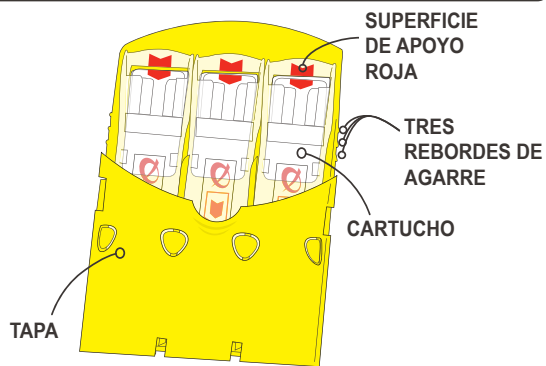


1. Apriete los rebordes de agarre de ambos lados del BladeCASSETTE para abrir la tapa.

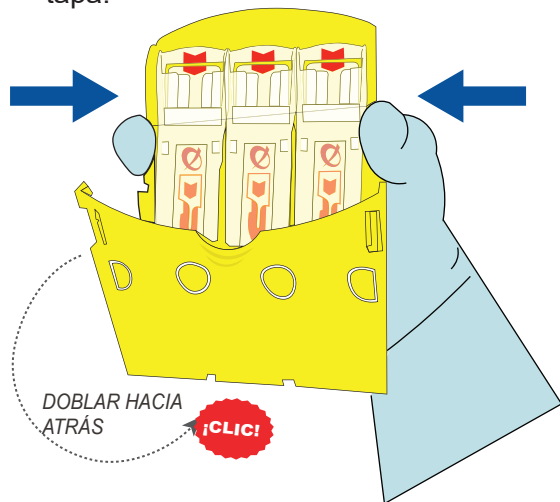

2. Doble la tapa hacia atrás hasta que escuche un clic que la bloquea en su sitio, luego coloque el BladeCASSETTE en posición vertical sobre un paño quirúrgico.


REMOVER LA HOJA DE BISTURÍ CON UNA SOLA MANO:

3. Utilizando una mano, introduzca la punta del bisturí en el cartucho:

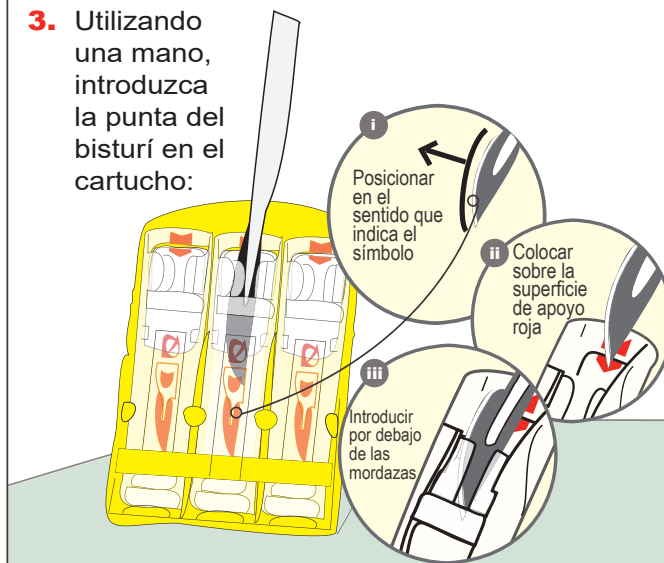

4. Inclíne el BladeCASSETTE hasta 90°, luego empuje el bisturí hacia abajo hasta que escuche un clic.


5. Inclínelo de vuelta hasta la posición vertical sobre el campo quirúrgico.

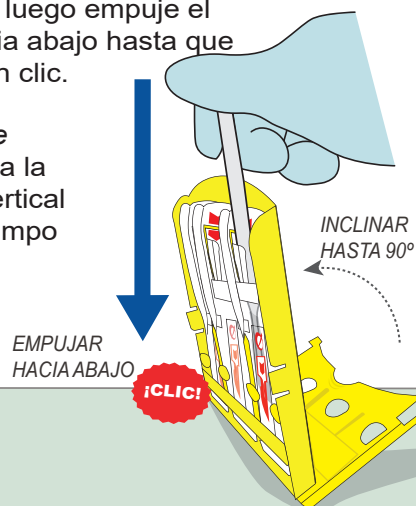

ES SEGURO


USAR LAS DOS MANOS:

6. Tome el BladeCASSETTE con la mano que tenga libre y retire el bisturí.

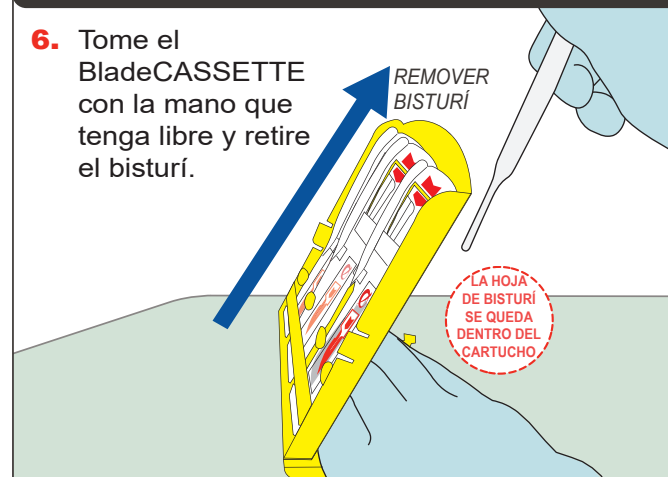


7. Repita el proceso de remoción de hojas de bisturí según sea necesario para remover hasta 3 hojas de bisturí.

8. Cierre la tapa, de vuelta a la posición inicial.

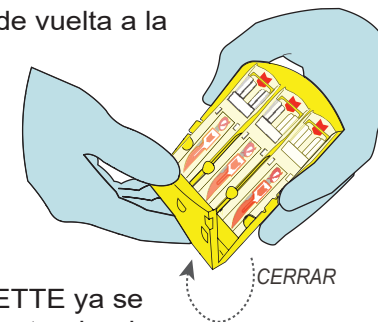

9. El BladeCASSETTE ya se puede tirar al contenedor de objetos corto-punzantes.

HOJAS DE BISTURÍ VISIBLES PARA UN FÁCIL RECuento

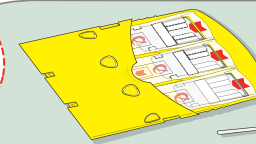

Donawa Lifescience
Piazza Albania, 10
00153 Rome, Italia



Disponer como residuo médico



Qlicksmart Pty Ltd.
Level 1, 148 Boundary St, West End,
Brisbane, QLD 4101, Australia
+61-7-3844-1182 T
hello@qlicksmart.com | www.qlicksmart.com