

BladeNeedleSYSTEM

Extractor de hojas de bisturí | Contador de agujas



Donawa Lifescience
Piazza Albania, 10
00153 Rome, Italia

ESTÉRIL



Disponer como residuo médico



... por su seguridad

Qlicksmart Pty Ltd.

Level 1, 148 Boundary St, West End,
Brisbane, QLD 4101, Australia


+61-7-3844-1182 T

hello@qlicksmart.com | www.qlicksmart.com


Instrucciones de uso

PREPARAR CON LAS DOS MANOS:

1. Retire el envoltorio estéril y quítele el papel a la cinta adhesiva de doble cara. Abra el BladeNeedleSYSTEM y fije el aparato a una superficie.

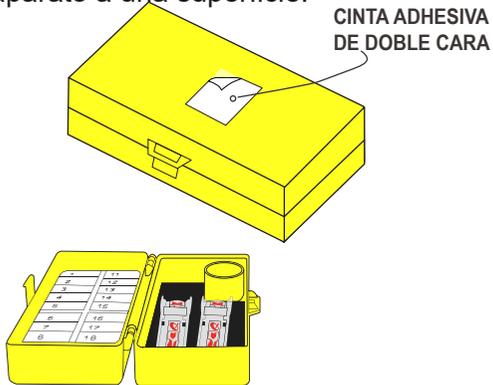


2. Para remover una hoja de bisturí, coloque un cartucho en el soporte redondo.

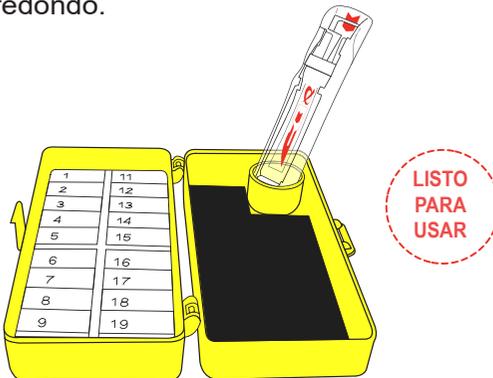


REMOCIÓN DE HOJAS DE BISTURÍ CON UNA SOLA MANO:

3. Utilizando una mano, introduzca la punta del bisturí en el cartucho.

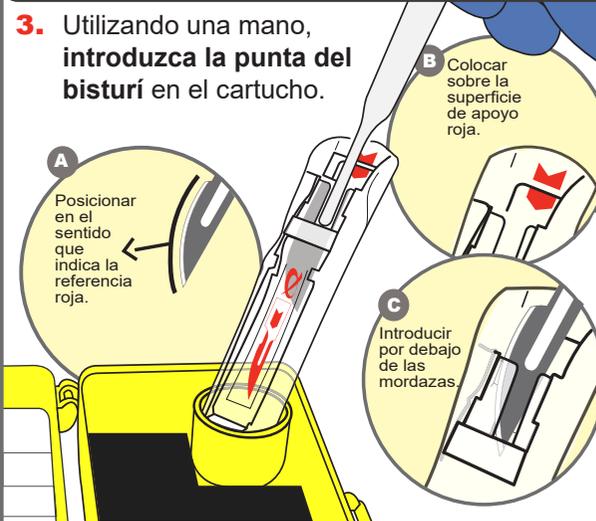


4. Incline el cartucho hasta 90°, luego empuje el bisturí hacia abajo hasta que escuche un clic.

5. Retire el cartucho del soporte redondo.

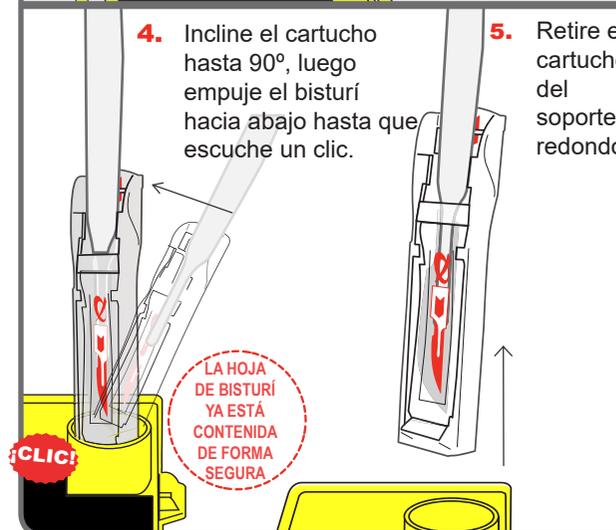


ES SEGURO USAR LAS DOS MANOS:

6. Utilizando las dos manos, retire el bisturí. La hoja de bisturí ya está lista para el recuento.

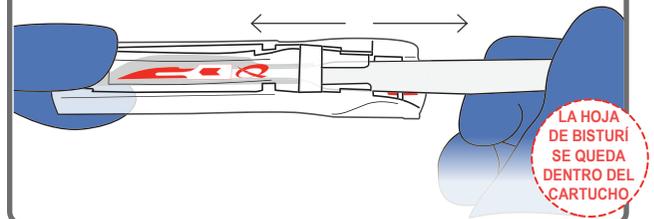

CONTADOR DE AGUJAS

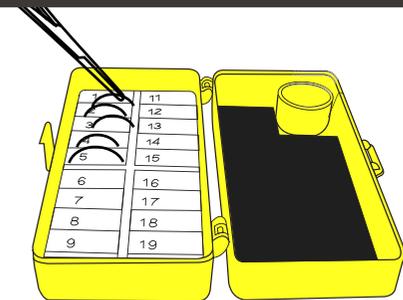

7. Inserte las agujas usadas en la espuma según sea necesario.

DISPOSICIÓN

8. Tire el contador de agujas y los cartuchos por separado a un contenedor de objetos corto-punzantes.

