

BladeNeedleSYSTEM

Usuwacz ostrzy | Licznik igieł

**Work Safe
Today,
Play Safe
Tomorrow**



www.qlicksmart.com

 **QLICKSMART**[®]
... and be safe

Niedoszacowane zranienia ostrymi narzędziami

Zranienia skalpelem są 6-krotnie bardziej prawdopodobne niż skaleczenia igłą i zdarzają się najczęściej na salach operacyjnych. Niestety, placówki medyczne i pracownicy służby ochrony zdrowia nie zawsze są w pełni świadomi ryzyk związanych ze skaleczeniami ostrymi narzędziami.

Zranienia skalpelami mogą powodować m.in. infekcje wywołane chorobami przenoszonymi we krwi oraz stres psychiczny. Poważniejsze urazy mogą również wymagać skomplikowanych zabiegów chirurgicznych w celu naprawy uszkodzonej tętnicy dłoniowej, nerwu czy ścięgna.

Wielu zranieniom można zapobiec używając **BladeNeedleSYSTEM (BNS)** od Qlicksmart - jedynemu w swoim rodzaju usuwaczowi ostrzy, używanego tylko jedną ręką, połączonemu z licznikiem igieł.

Pionierskie rozwiązanie w zakresie bezpiecznego usuwania ostrzy



BNS łączy w sobie dwa urządzenia bezpieczne - wyjątkowy usuwacz ostrzy używany tylko jedną ręką oraz standardowy licznik igieł, umożliwiając bezpieczne liczenie oraz utylizację zarówno ostrzy, jak i igieł.




BNS posiada szybki i łatwy w użytkowaniu mechanizm "wsuń-kliknij-wysuń", służący do ściągania i przechowywania zużytych ostrzy.



BNS stanowi tańszą alternatywę dla skalpeli bezpiecznych i pozwala użytkownikom na korzystanie z preferowanych, standardowych rękojeści metalowych.




W połączeniu z bezkontaktowym sposobem przekazywania narzędzi medycznych, BNS pozwala zapobiec nawet 5-krotnie większej liczbie skaleczeń niż skalpele bezpieczne.

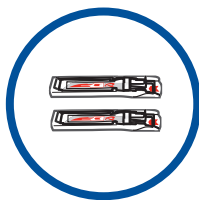

Dla bardziej złożonych zabiegów dostępne są dodatkowe usuwacze ostrzy.



BNS został przyjęty z entuzjazmem przez personel na całym świecie dzięki podwójnemu zastosowaniu, niskim kosztom zakupu oraz możliwości łatwego włączenia w skład zestawów zabiegowych.

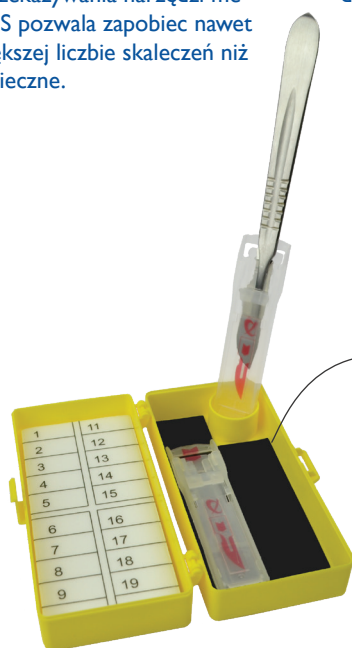

BNS jest wyposażony w numerowaną gąbkę do zliczania igieł, magnetyczną powierzchnię przytrzymującą ostrza przeznaczone do utylizacji oraz praktyczny usuwacz ostrzy.

Kod produktu	QBNS202S	
Kod GMDN	46236	
Pojemność	2 usuwacze w zestawie - każdy usuwacz pomieści jedno ostrze chirurgiczne	
Kompatybilne ostrza i rękojeści*	Rękojeści nr: 3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Baron, Lawton Long, rękojeści cylindryczne Ostrza nr: 10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sabre D/15.	
Niekompatybilne ostrza i rękojeści	Rękojeści Beaver, skalpele jednorazowe	
Wymiary (sztuka)	Zamknięty: Długość 11.7cm Szerokość 6.6cm Wysokość 3.9cm	Otwarty**: Długość 11.7cm Szerokość 12.7cm Wysokość 8.7cm
Waga (sztuka)	51g	

Wykonanie	Pojemnik z licznikiem igieł: Polistyren wysokoudarowy Usuwanie: Polipropylen (PP)
Lateks	Nie
DEHP	Nie
Sterylny	Tak
Metoda sterylizacji	Promieniowanie gamma
Wielokrotnego użytku	Nie, pojedynczy usuwacz mieści jedno ostrze przeznaczone do utylizacji
Metoda utylizacji	Po zliczeniu ostrzy i igieł, licznik igieł oraz usuwacze są utylizowane osobno w pojemniku na ostre odpady medyczne.
Zgodność	Australia - TGA ARTG No: 208058 USA - certyfikowany przez FDA UE - wyrób medyczny Klasy I zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG, oznaczony znakiem CE

BNSB160511A3PO


* Qlicksmart BladeNeedleSYSTEM jest kompatybilny z większością ostrzy i rękojeści.

** Otwarta obudowa z usuwaczem umieszczonym w pozycji stojącej.


Jak korzystać z BladeNeedleSYSTEM

PRZYGOTUJ UŻYWAJĄC OBU RĄK:

- Wymij BladeNeedleSYSTEM ze sterylnego opakowania i odbezpiecz taśmę dwustronną. Otwórz obudowę i przyklej do płaskiej powierzchni.

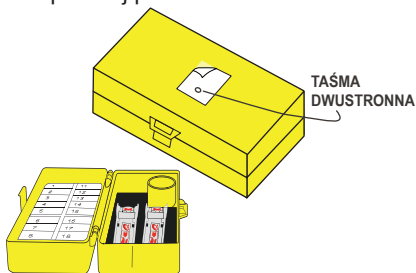


- Aby usunąć ostrze, umieść usuwacz ostrzy w okrągłej podstawie.

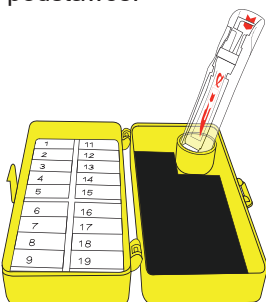


USUWACZ OSTRZY JEDNĄ RĘKĄ:

- Używając jednej ręki, wsuń czubek ostrza do usuwacza.

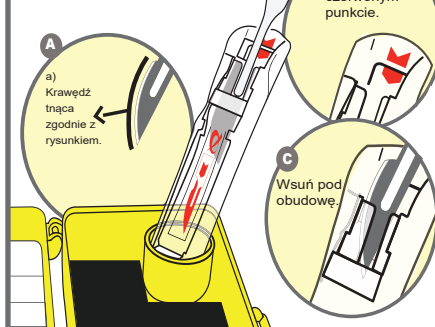


- Przechyl usuwacz do pozycji pionowej, po czym wsuń ostrze, aż usłyszysz kliknięcie.

- Wyciągnij usuwacz z okrągłej podstawki.

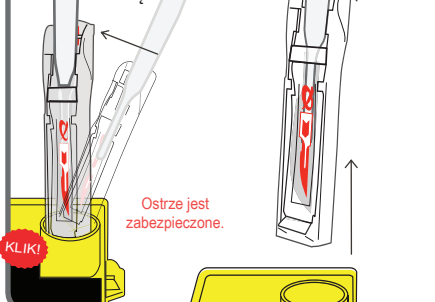


ZABEZPIECZ UŻYWAJĄC OBU RĄK:

- Wysuń rękojeść z usuwacza używając obu rąk. Ostrze jest gotowe do zliczenia.

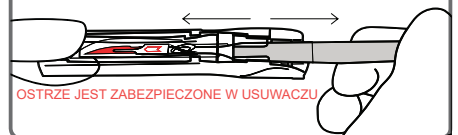

LICZNIK IGIEŁ

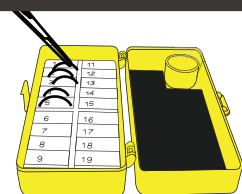

- Osadź zużyte igły w piance. Większe igły mogą być umieszczone na płaskiej powierzchni magnetycznej.


UTYLIZACJA

- Licznik igieł oraz usuwacze ostrzy należy utylizować osobno w pojemniku na ostre odpady medyczne.



Pozostałe produkty Qlicksmart

BladeFLASK
Usuwać ostrzy

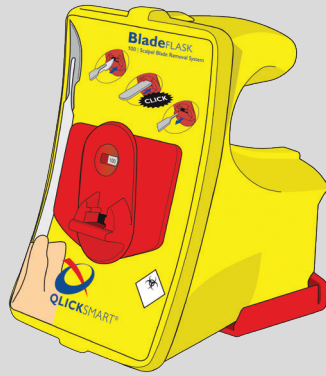


BladeFlask EVO
Usuwać ostrzy



Otwieracze ampulek SnapIT i SnapIT Lite



BladeCASSETTE Sterile
Sterylny usuwacz ostrzy

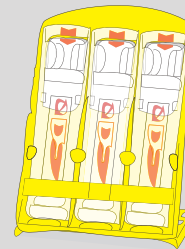

CheckCLIP Identyfikator medyczny



O firmie Qlicksmart

Firma Qlicksmart Pty Ltd została założona w 1999 roku przez dwóch australijskich lekarzy, których główną misją było zwalczanie skażeń skalpelami w placówkach opieki medycznej. Obecnie podstawowym celem Qlicksmart jest sprawianie, by środowisko pracy personelu ochrony zdrowia było łatwiejsze i bezpieczniejsze - tak aby mogli oni skupić się wyłącznie na opiece nad pacjentem. Wielokrotnie nagradzane przyrządy bezpieczne firmy Qlicksmart używane są obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie. Qlicksmart współpracuje z innowatorami z sektora opieki zdrowotnej w celu dostarczania rozwiązań ukierunkowanych na często pomijane problemy pielęgniarek, lekarzy i placówek opieki zdrowotnej. Aby dowiedzieć się więcej o przyrządach bezpiecznych Qlicksmart, odwiedź stronę www.qlicksmart.com lub poproś swojego dystrybutora o prezentację.

Qlicksmart Pty Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street
West End, Brisbane
QLD, Australia 4101



+61 7 3844 1182



hello@qlicksmart.com
www.qlicksmart.com



wyszukaj "qlicksmart" i
pozostań w kontakcie



Zeskanuj kod QR,
aby dowiedzieć
się więcej o
BladeNeedleSYSTEM



Dystrybutor: